

Nanoimplantát o průměru 2,0 mm

flaples a okamžité zatížení

Kazuistika MUDr. Ctibor Arnold
Hedvika Valentová, Angelika Červenková



Pacientka ročník 1980, 35 let, odeslána z ortodoncie na vyřešení s dg. anodontia 12, 23. Došlo k ortodontickému rozšíření mezery do stavu dle OPG. Více dle ortodontisty nelze provést. Odeslána s žádostí o posouzení stavu a případnou léčbu zubními implantáty.



OPG – výchozí stav

Vpravo je mezera 5 mm

Vlevo je mezera 6 mm,
interradikulárně pouze 4 mm





Preparace mukoperiostu slizničním trepanem


Odstranění mukoperiostu






Odstraněný mukoperiost – díky
flaples jsou zachovány papily

Preparace štoly

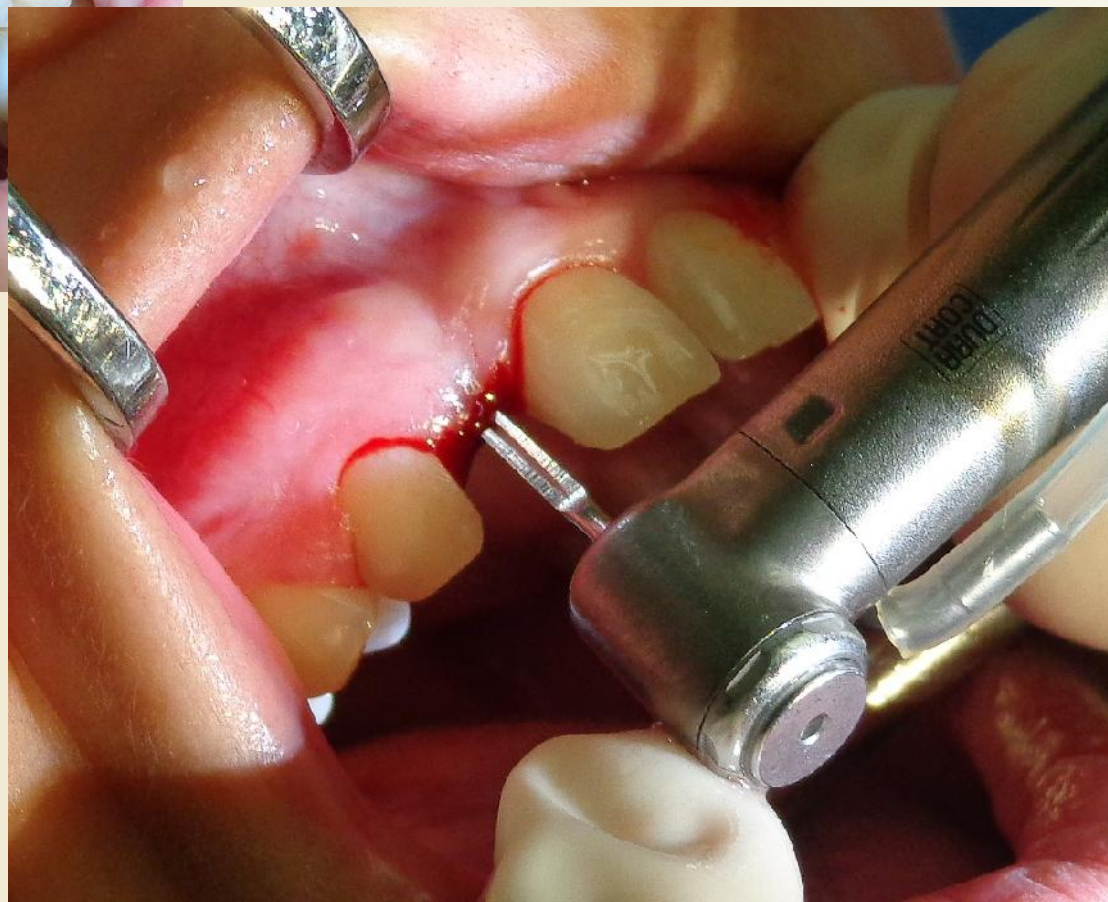



Měření hloubky preparace

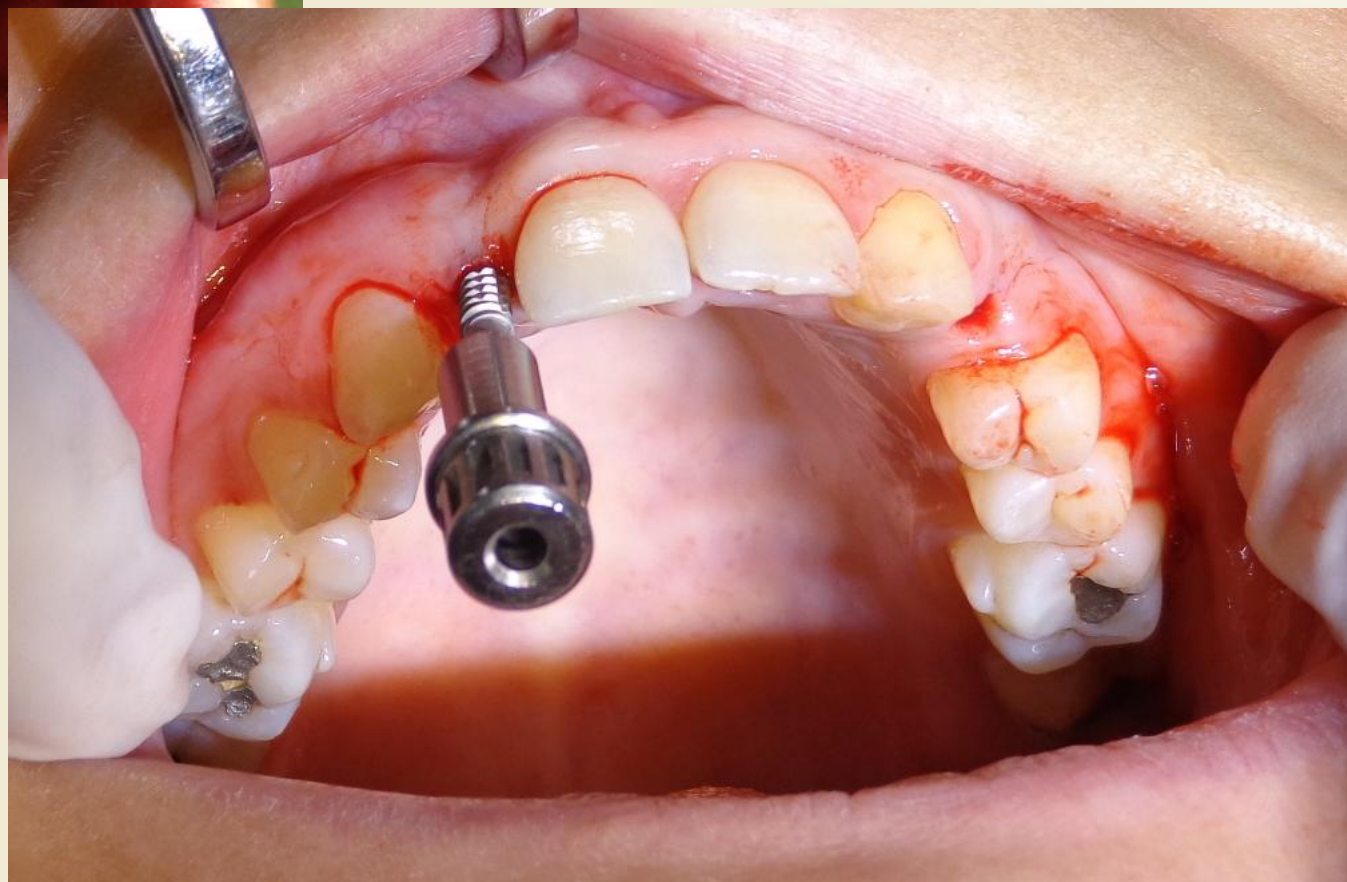

Fáze zavádění implantátu





Zavedené implantáty NANOIMPLANT®
průměru 2,0 mm a délce intraosseální
části 12 mm

Otiskování po operaci





Protetické implantáty




Model s provizorními korunkami



Měření interkoronálního rozměru – vpravo 5 mm

Interkoronální rozměr vlevo jen 6 mm, interradiální 4 mm vlivem sklonu špičáku
(špičák je v pozici 22)

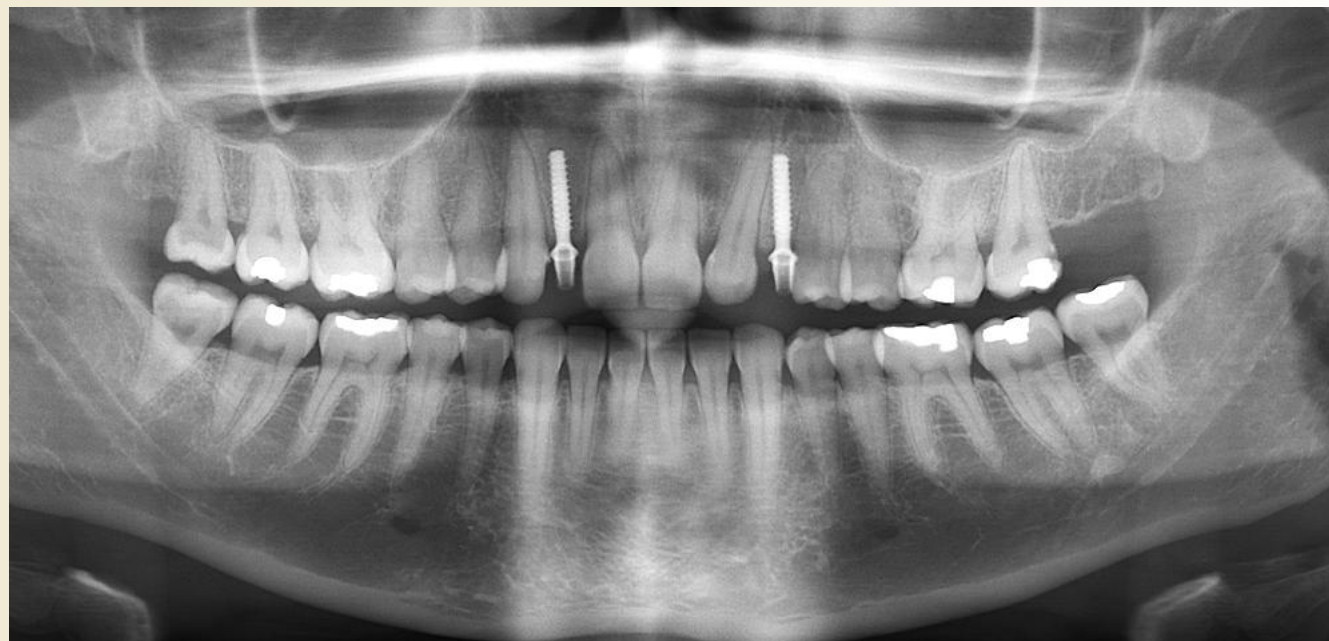

OPG po zavedení 2 ks
nanoimplantátů
průměru 2,0 mm



Provizorní korunky nasazený druhý
den po zavedení implantátů